



SUPPORT
Dienstleistungen für Ihre Praxis

Entnahmematerial

Universal-Abstrich-Set «eSwab»

Ein neues Transportmedium der Laborgemeinschaft 1 zur mikrobiologischen Diagnostik

Einführung

Das neue Universal-Abstrich-Set «eSwab» besteht aus einem Abstrichtupfer (dick oder dünn) und einem Transportmedium. Es eignet sich für *sämtliche* mikrobiologischen Proben, die mit einem Abstrichtupfer entnommen werden. Diese Innovation ersetzt alle bisher eingesetzten Abstrich-utensilien.

Vorteile

- Die Probe eignet sich für die Züchtung von Mikroorganismen und für molekularbiologische Untersuchungen auf Infektionserreger (PCR)
- Einfachere und optimale Probenentnahme
- Mehrfachanalyse aus bruch sicherem Transportmedium möglich

Probengewinnung

1. Aufnahme der Probe mit Abstrichtupfer
2. Tupfer in Transportmedium überführen und an der gekennzeichneten Sollbruchstelle abbrechen
3. Transportmedium mit Tupfer gut zuschrauben
4. Transportmedium beschriften mit:
 - Patientennamen
 - Materialbezeichnung
5. Proben an die Laborgemeinschaft 1 senden

Empfehlung

- Sind gleichzeitig kulturelle und molekularbiologische Untersuchungen aus gleichem Material erwünscht, kann grundsätzlich ein Transportmedium eingesetzt werden.

Ausnahme: Zervical- und Vaginalproben sollten nicht gemischt werden. Für jedes Material jeweils separat ein eSwab-Transportmedium abnehmen.

- Flüssige Proben wie Punktate oder Ejakulate nicht im eSwab-Transportmedium einsenden. Für diese Proben eignen sich unsere sterilen Nativröhrchen.

Information

Moritz Grubenmann, Biljana Savic, Abteilung Mikrobiologie