




Informationen

Serumversand
Labor

Neue Versandröhrchen für Serum

Einleitung

Um Ihre Aufträge noch schneller und sicherer abzuwickeln, setzen wir ab dem 1. März 2015 eine neue, automatisierte Probenverteilstation ein. Damit entfällt das manuelle Umgiessen und Aufsplitten der Proben.

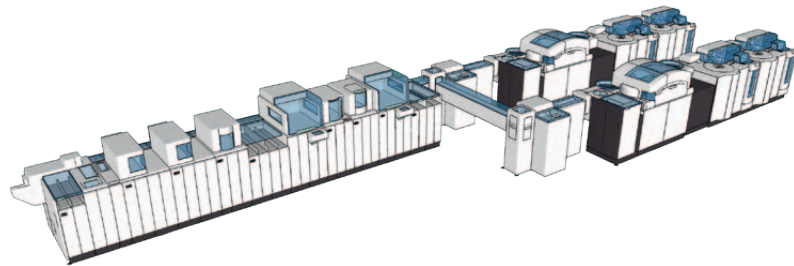

Was ändert sich für Sie?

Möglichkeit 1

Versandröhrchen für Serum

Sie zentrifugieren in der Praxis Ihre Blutproben. Giessen das Serum in ein **Versandröhrchen für Serum** und senden diese Probe an die Laborgemeinschaft 1.



ALTES Versandröhrchen für Serum

Bitte nicht mehr für Serumversand verwenden.

Mat. Bestellnr.: 021 b



NEUES Versandröhrchen für Serum

Neu verwenden wir Versandröhrchen der Firma Sarstedt (Art.Nr. 62.612).

Mat. Bestellnr.: 021 a

Möglichkeit 2

Blutröhrchen mit Trenngel

Sie zentrifugieren in der Praxis Ihre Blutproben. Giessen das Serum **aber nicht** in ein Versandröhrchen für Serum ab, sondern schicken uns das zentrifugierte Entnahmeröhrchen mit Trenngel.



Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel, Monovetten
Mat. Bestellnr.: 010 m



Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel, Vacutainer
Mat. Bestellnr.: 010

ACHTUNG!

Falls das Blutentnahmeröhrchen **nicht am gleichen Tag** in die Laborgemeinschaft 1 gelangt, sollte das Serum ebenfalls in ein Versandröhrchen für Serum umgegossen werden, da der Gel mit der Zeit durchlässig wird und die Blutzellen oder Bestandteile davon wieder in das Serum gelangen.



Informationen

Serumversand
Labor

Was ändert sich NICHT für Sie?

Die «alten Versandröhrchen für Serum» können weiterhin wie gewohnt für den Urinversand gebraucht werden. Auf der Materialbestellliste heissen sie jetzt NEU: **Versandröhrchen für Urin (Nr. 021b Versandmaterial/siehe weiter unten)**

Wo bekomme ich die neuen Sekundärgefässe?

Die neuen Versandröhrchen für Serum können wie bis anhin über die gleichen Kanäle bezogen werden.

| Versandmaterial | | | |
|-----------------|---|-------|------|
| Nr. | Artikel | Stück | Pack |
| 005b | Versandsäckli Kurier | | |
| 005 | Versandsäckli Post | | |
| 022 | Schutzhüllen für Röhrchen | | |
| 023 | Schutzhüllen für Postversand (1 Probe) | | |
| 024 | Schutzhüllen für Postversand (3 Proben) | | |
| 025 | Schutzhüllen für Objektträger | | |
| 021a | Versandröhrchen für Serum (5 ml) | | |
| 021b | Versandröhrchen für Urin (5 ml) | | |
| 059 | EDTA Röhrchen für Hämatologie 2 ml | | |
| 059b | EDTA Röhrchen für Hämatologie 5 ml | | |

Auszug Liste
«Materialbestellung» LG1

Bei Fragen?

Steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung

Frau Tünde Kocsis:
Mobile 078 750 72 20
Zentrale 044 404 20 80
E-Mail tkocsis@lg1.ch

Vorankündigung

Am 26. März 2015 findet eine Weiterbildung zum Thema ALLERGIE statt (Einladung folgt mit separatem Flyer).

Anlässlich dieses Events besteht die Möglichkeit, unsere neuen Laborräumlichkeiten (inkl. neue Probenverteilstation in Aktion) an der Rautistrasse 11, 8047 Zürich zu besichtigen. Türöffnung und Führung um 17.00 Uhr.