



Informationen

Entnahmematerial
Mikrobiologie

Neues Transportmedium «FecalSwab™»

Ein neues Transportmedium der Laborgemeinschaft 1 zur mikrobiologischen Diagnostik

Einführung

Das Transportmedium FecalSwab™ ist für die gastrointestinale Multiplex-PCR für den Nachweis von Bakterien, Viren und Parasiten geeignet.

Vorteile

Mit dem FecalSwab™ kann die Stuhlprobe via Rektalabstrich direkt in der Praxis entnommen werden. Dies bringt ein Zeitgewinn für die Diagnostik, da die Probe noch am gleichen Tag ins Labor transportiert und gegebenenfalls verarbeitet werden kann.

Probengewinnung

1. Abstrichtupfer 2–3 cm rektal einführen und mehrmals drehen
2. Tupfer ins Transportmedium überführen und an der gekennzeichneten Sollbruchstelle abbrechen
3. Transportmedium mit Tupfer gut zuschrauben
4. Transportmedium beschriften mit:
 - Patientennamen
 - Geburtsdatum
5. Probe an die Laborgemeinschaft 1 senden

Empfehlung

Der FecalSwab™ ist NUR für den Rektalabstrich vorgesehen; er ist für andere Abstriche oder Probematerialien nicht geeignet.

Bestellung

Der FecalSwab™ kann mit dem Materialbestellformular angefordert werden:

037a	Rektalabstrich «FecalSwab™»		
------	-----------------------------	--	--

Auskunft

Fatime Imeri, Dr. med., dipl. Mikrobiol., EMBA UZH
Spezialistin Labormedizin FAMH Hämatologie, Klinische Chemie, Immunologie,
Mikrobiologie, fimeri@lg1.ch

Hanspeter Hinrikson, Dr. sc. nat., Spezialist FAMH Mikrobiologie,
Abteilungsleitung Mikrobiologie, hphinrikson@lg1.ch