



BESTIMMUNG KRYOGLOBULINE

SPEZIELLE BLUTENTNAHME

Für die Bestimmung der **Kryoglobuline** braucht es eine **spezielle Blutentnahme**.

MATERIAL

2x Nativ-Vollblut (ohne Gel) und 2x EDTA-Vollblut



VORGEHEN

Blutprobe abnehmen und sofort im Wärmeschrank oder Wasserbad bei 37°C **mindestens 2 Stunden** stehend koagulieren/sedimentieren lassen (nicht zentrifugieren).

Das überstehende Serum und das Plasma sorgfältig in 4 Serum-Versandröhrchen (ohne Erythrozyten!) abpipettieren und ins Labor senden.



Röhrchen korrekt mit Serum und EDTA-Plasma beschriften.