



Diagnostik

Tuberkulose
Serologie

NEUES VORGEHEN QuantiFERON®-TB Gold

Vereinfachte Blutentnahme

Dank einer Neuerung bei der Untersuchung auf eine Mycobacterium-tuberculosis-Infektion mit dem QuantiFERON®-TB Gold vereinfacht sich die Blutentnahme.

Bis anhin mussten für das QuantiFERON® drei spezielle Blutproben entnommen werden.

Ab sofort ist nur noch eine Blutprobe im Lithium-Heparin-Röhrchen nötig.

Unverändert bleibt, dass die Blutprobe innerhalb von 16 Stunden bei uns im Labor eintreffen muss.

Die Lagerbestände an alten QuantiFERON®-TB-Gold-Röhrchen können an uns zurückgesandt werden (bzw. dem Kurier mitgegeben werden).

Bei Fragen oder Unklarheiten geben unsere Fachspezialisten aus der Serologie gerne Auskunft.

Neues Vorgehen

Benötigtes Material:

Lithium-Heparin Vollblut (wahlweise Vacutainer- oder Monovetten-System)

1. Entnehmen Sie mithilfe eines Lithium-Heparin-Röhrchens eine Blutprobe von **mindestens 5 ml**. Falls weitere Analysen aus verschiedenen Blutentnahmeröhrchen verlangt sind, bitte Reihenfolge beachten (Infoblatt Präanalytik Blutentnahme).
2. Nach der Blutentnahme das Röhrchen unbedingt durch 8- bis 10-maliges Kippen gut mischen. **Nicht zentrifugieren.**
3. Beschriften Sie das Röhrchen und geben Sie dabei auch die **Uhrzeit der Blutentnahme** an.
4. Bitte kreuzen Sie auf dem Auftragsformular «Allgemein» unter Serologie den Quantiferon-Test an und versehen Sie den Auftrag mit den Patientendaten, **dem Entnahmedatum und der Entnahmezeit.**

Klinische Angaben erleichtern uns eine Befundinterpretation (z.B. vor immunsuppressiver Therapie, Gesundheitspersonal oder früher durchgemachte Tuberkulose).

5. Lagerung und Transport bei Raumtemperatur.
6. Beachten Sie, dass der Auftrag **am Tag der Blutentnahme** bei uns im Labor eintreffen muss. Falls die Blutprobe älter als 16 h ist, kann die Analyse nicht mehr durchgeführt werden.

Neues QuantiFERon-Set Bestellen

| Spezialmaterial | | | |
|-----------------|------------------------------------|--------|--------|
| Nr. | Artikel | Stück | |
| | | Vacut. | Monov. |
| 063 | Quantiferon-Set | | |
| 001 | Versand-Set für Kühltransport | | |
| 064 | Distanzhalter-Set (für Zentrifuge) | | |
| 002 | Notfall-Kleber | | |

Neu beim Bestellen des QuantiFERon-Sets gewünschte Stückzahl bei *Vacut.* (Vacutainer-System) oder *Monov.* (Monovetten-System) eintragen.