

## QUANTIFERON TEST ANLEITUNG

---

### BLUTENTNAHME

Blutentnahme erfolgt in dem mitgelieferten Lithium- Heparin- Vollblut Röhrchen ohne Trenngel (wahlweise Vacutainer- oder Monovetten-System)

---

1. Entnehmen Sie eine Blutprobe von mindestens 5 ml in ein Lithium- Heparin-Röhrchen ohne Gel. Falls weitere Analysen aus verschiedenen Blutentnahmeröhrchen verlangt sind, bitte Reihenfolge beachten (Infoblatt Präanalytik Blutentnahme)

---

2. Nach der Blutentnahme das Röhrchen unbedingt durch 8–10 maliges Kippen gut mischen. Nicht zentrifugieren.

---

3. Beschriften Sie das Röhrchen mit Name und Geburtsdatum des Patienten und geben Sie zudem Entnahmedatum und Entnahmezeit an.

---

4. Bitte kreuzen Sie auf dem Auftragsformular «Allgemein» unter Serologie den Quantiferon-Test an und versehen Sie den Auftrag mit den Patientendaten, dem Entnahmedatum und der Entnahmezeit.

Klinische Angaben erleichtern uns eine Befundinterpretation (z.B. vor immunsuppressiver Therapie, Gesundheitspersonal oder früher durchgemachter Tuberkulose).

---

5. Lagerung und Transport bei Raumtemperatur. Blut nicht kühlen oder einfrieren.

---

6. Beachten Sie, dass der Auftrag am Tag der Blutentnahme bei uns im Labor eintreffen muss.

Falls die Blutprobe älter als 16 Stunden ist, kann die Analyse nicht mehr durchgeführt werden.

Analysen sind am Samstag und vor Feiertagen nicht möglich.