


Positionierung der Elektroden

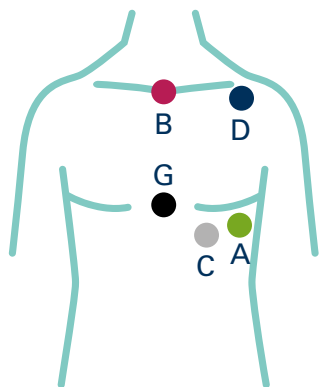

A – green
B – red
C – grey
D – blue
G – black

Channel I: A – B
Channel II: B – C
Channel III: A – D
Neutral: G

Stoppen der Aufzeichnung und Datenauswertung

- 1 Das Gerät stoppt die Aufzeichnung nach 24 Stunden automatisch.
- 2 EKG-Koffer (Schiller-Box) inklusive Speicherkarte, Anamneseblatt (Anmeldung), Rechnungsadresse, Kopie Krankenkassenkarte und Patiententagebuch an die Laborgemeinschaft 1 retournieren.

Bei Fragen innerhalb der Öffnungszeiten

Zentrale

☎ +41 44 404 20 80
@ material@lg1.ch

Bei Fragen ausserhalb der Öffnungszeiten

Karin Flückiger/Karin Birkenhoff
Aussendienst

☎ +41 44 404 20 99 (Flückiger)
☎ +41 78 750 72 20 (Birkenhoff)
@ kflueckiger@lg1.ch
@ kbirkenhoff@lg1.ch



Ihr Labor –
unabhängig,
kompetent,
kundennah.



Laborleitung FAMH:
Fatime Imeri, Dr. med., dipl. mikrobiol.
Hanspeter Hinrikson, Dr. sc. nat.
Raffaele Curcio, Dr. sc. nat.

Laborgemeinschaft 1
Rautistrasse 11, 8047 Zürich
T 044 404 20 80
F 044 404 20 88
lg1@lg1.ch, www.lg1.ch

Laborgemeinschaft 1
Greifengasse 18, 4058 Basel
T 061 261 66 13
F 061 261 66 05
basel@lg1.ch, www.lg1.ch

Anleitung 24-Stunden-EKG

lg¹
Laborgemeinschaft 1
Medizinisches Labor

Inhalt Schiller-Box



- 1 EKG-Gerät
- 2 Hygienetasche
- 3 Gürtel
- 4 Speicherkarte
- 5 AAA-Batterie
- 6 Einmalrasierer
- 7 Selbstklebeelektroden
- 8 Anamneseblatt (Anmeldung)
- 9 Patiententagebuch

Wichtige Informationen

Kosten **24-Stunden-EKG:**
Tarmed-Position 17.0130
«Holter-EKG, Anlegen inkl. Entfernen»
Taxpunkte: 62.77

Abrechnung Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, dass das EKG über Dr. med. Michael Abay, Bahnhofstr. 56, 8001 Zürich abgerechnet wird.

Anamneseblatt (Anmeldung) Füllen Sie die Anmeldung vollständig und korrekt aus. Dies ist für die Auswertung sehr wichtig.

Patienten-tagebuch Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit das Patiententagebuch korrekt auszufüllen. Datum und Uhrzeit müssen bei auftretenden Beschwerden in das Patiententagebuch eingetragen werden. Falls während der Messung keine Beschwerden auftreten, ist dies im Patiententagebuch zu vermerken.



Speicherkarte Speicherkarte NICHT beschriften!

Allgemeine Vorbereitung

- Anmeldeformular mit Fragestellung vorhanden
- Rechnungsadresse und Kopie Krankenkassenkarte (Vorder- und Rückseite) des Patienten vorhanden
- Kleidervorschlag für Patienten während der Aufzeichnung: eng anliegendes T-Shirt, Gürtel, Sport-BH
- Patiententagebuch (Beschwerden, Aktivitäten) abgeben

Anlegen des 24-Stunden-EKG (Schiller, Medilog AR12 plus)

- 1 EKG-Gerät öffnen und neue Batterie einlegen (AAA-Batterie).
- 2 Deckel mit Darstellung der Elektrodenplatzierung (linke Darstellung mit 5 Elektroden) gut sichtbar bereit legen.
- 3 Die 5 Elektroden gemäss Anleitung auf der Innenseite des Deckels anbringen (oder siehe «Positionierung der Elektroden»).
- 4 Speicherkarte (kleiner Chip in Deckelinnenseite der Schiller-Box) in EKG-Gerät einsetzen (kopfüber).
- 5 Deckel schliessen (erst an Hinterkante einfädeln, dann vordere Verschlusskappe zustecken).
- 6 Gerät einschalten: rechten oberen Knopf auf Vorderseite drücken.
- 7 Unteren Knopf mit EKG-Symbol dreimal drücken (EKG1, EKG2, EKG3) und jeweils schauen, ob ein EKG im Display erscheint.
- 8 Nach Kontrolle des dritten EKG-Symbols oberen REC-Knopf zum Starten der Aufzeichnung drücken. Auf dem Display erscheint für ca. 2 Minuten eine Sanduhr. Während dieser Zeit soll der Patient ganz still sitzen, da Ableitungen kalibriert werden.
- 9 Die Uhrzeit erscheint auf dem Display. Nach gewisser Zeit verschwindet diese wieder und ein Smiley-Symbol leuchtet auf = alles korrekt.
- 10 EKG-Gerät in Schutztasche stecken und diese entweder am Gürtel oder mit dem Band um den Hals tragen.

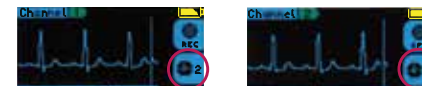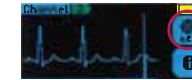

Positionierung der Elektroden,
Stoppen der Aufzeichnung und
Datenauswertung

