


## Anleitung für den LolliSponge zur Untersuchung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)


**Eine Stunde vor der Probenahme nichts essen oder trinken,  
nicht rauchen, nicht Kaugummi kauen, Zähne nicht putzen.**

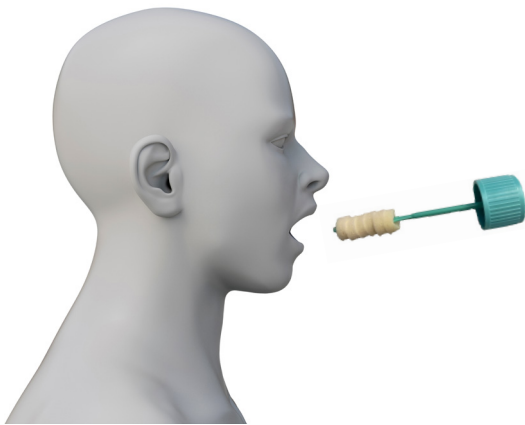

1. Lolli in den Mund nehmen und 30 Sekunden lang durch Vor- und Zurückbewegen der Zunge lutschen. Nicht kauen!



2. In der Zwischenzeit gibt die Betreuungsperson die Kochsalzlösung aus der Ampulle in das Teströhrchen.

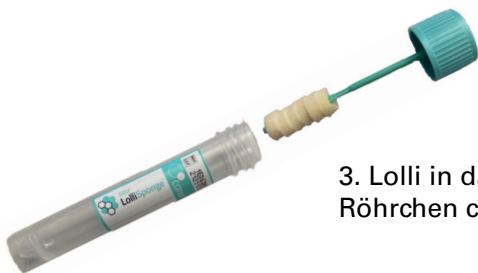

3. Lolli in das Teströhrchen zurückführen und dieses fest verschliessen.  
Röhrchen ca. 10 Mal leicht schütteln.

4. Teströhrchen mit Personalangaben beschriften und zusammen mit dem aufgefüllten  
Coronavirus-Auftragsformular in die Lg1-Versandtüte packen.  
Probe bis zum Transport im Kühlschrank zwischenlagern.

Probe dem nächstmöglichen Lg1-Kurier mitgeben.

